


Hjælpeiddelalgoritme 1: Valg af sejl til gulv og loftlift.

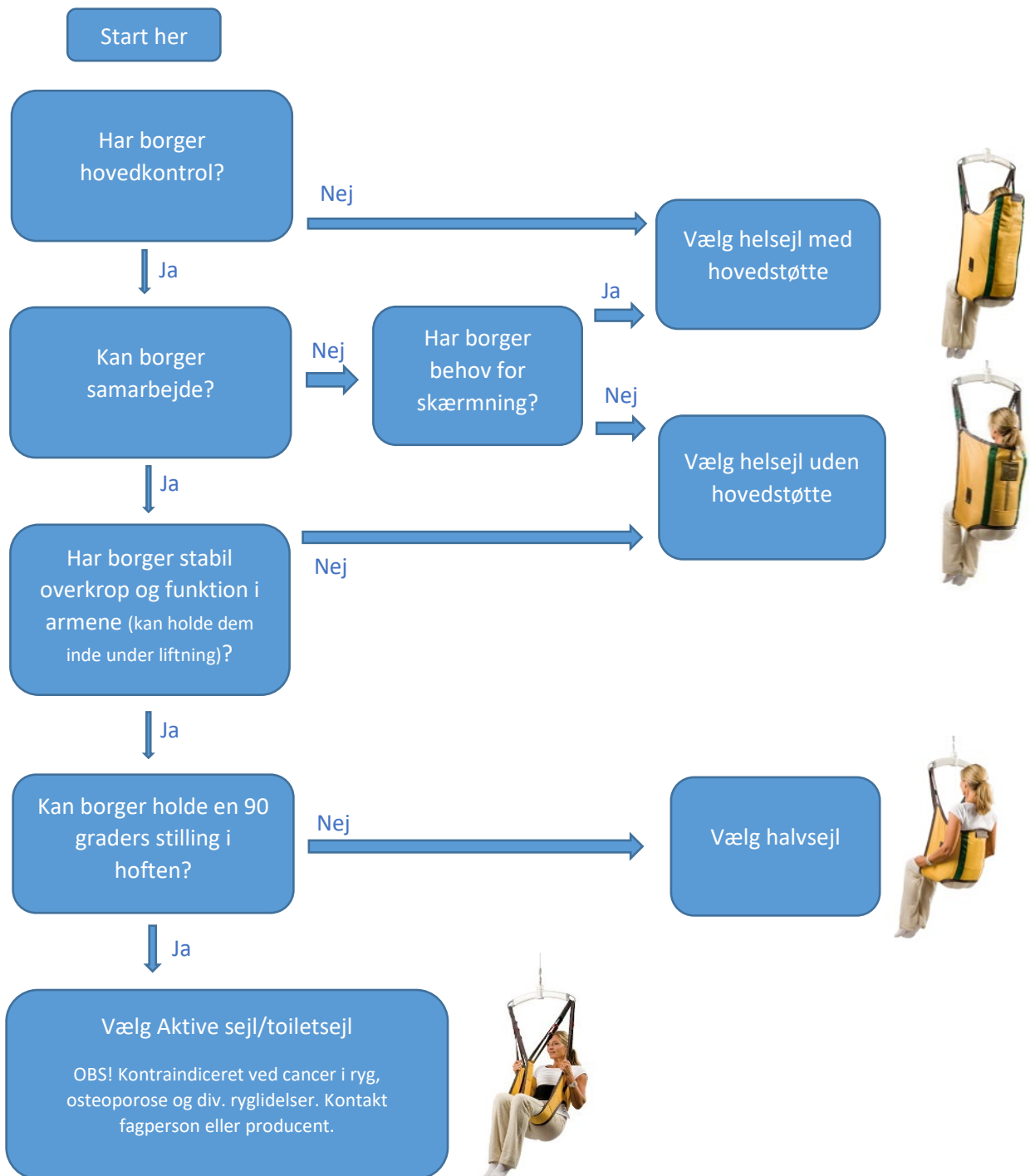

Arbejde med sejl

Benyt gerne glidestykke, SlingSocks og SlingVest ved pålægning af sejl.

Gør plads til liftning – flyt møbler.

Personale skal have instruktion i at lifte.

Pas på skjulte løft – især af ben.

Sejl til at sidde i

Sejl kan fås som siddesejl hvis en borger med lavt funktionsniveau er meget passiv, hvis borger kun skal sidde kortvarigt, ved special tilpassede kørestole, kraftig overvægt eller hvis borger flyttes ofte. Fås som hel-sejl m/u hovedstøtte.

Snak med fagperson eller producent.

Anbefalinger for brug af lift

Vurder om I skal være 1 eller 2 til liftning?

Ved brug af gulvlift anbefales 2x2 meters arbejdsplads.

Ved brug af loftlift anbefales 1,5x1,5 meters arbejdsplads.

Lift fra siddende til siddende.